



4 ÉTAPES SUFFISENT POUR OBTENIR UN CROCHET ITSOCLEAR EN MOINS DE 4 MINUTES...

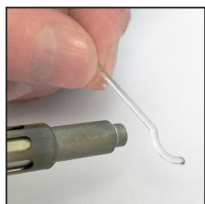

Chauffez le crochet avec un chalumeau à air chaud, en l'agitant légèrement. Puis passez légèrement une pince au-dessus de la source de chaleur. (ATTENTION : ne surchauffez pas le crochet, ni la pince)



Ajustez la forme du crochet autour de la dent en réchauffant la pince au besoin.

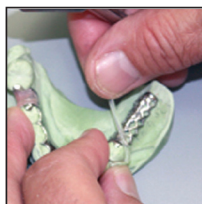

Après avoir formé le crochet autour de la dent, commencez à créer la rétention.




Créez la rétention en formant une boucle sur le côté opposé du crochet pour le fixer dans la résine.



Une fois la rétention obtenue, le crochet est prêt à être placé sur le châssis.



Fixez le crochet sur le châssis à l'aide d'une colle et d'un accélérateur.

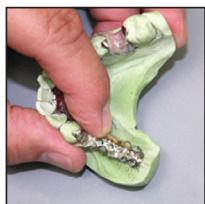

Enfin, mettez de la résine sous la zone de rétention et au-dessus du crochet afin qu'il reste bien en place.

...VOTRE PROTHÈSE PARTIELLE
EST DÉSORMAIS PRÊTE
À ÊTRE TRAITÉE
COMME D'HABITUDE.