


1 Choisissez la taille appropriée du porte-empreinte individuel

Les porte-empreintes sont disponibles en 2 tailles. Pour choisir la bonne taille, il suffit de tester le porte-empreinte qui convient à votre patient. Ne chauffez pas encore le porte-empreinte. Vous recherchez seulement la taille la plus appropriée. Ensuite vous l'adapterez pour un ajustement personnalisé.



2 Chauffez le porte-empreinte pour le ramollir

Plongez le porte-empreinte dans l'eau chaude (80-90°C pendant 1-2 minutes) jusqu'à ce qu'il devienne malléable. Il sera plus malléable s'il est soumis à une température plus élevée plus longtemps ; il sera moins malléable s'il est soumis à une température moins élevée moins longtemps (ce qui peut être utile pour réaliser de légers ajustements de détail).

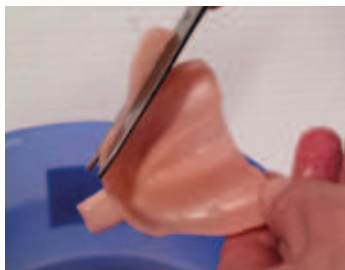

3 Adaptez le porte-empreinte en porte-empreinte personnalisé

■ Placez le porte-empreinte dans la bouche du patient ou sur le modèle et marquez les excédents.

■ Eliminez les excédents du porte-empreinte, s'il est chaud avec des ciseaux, ou s'il est froid avec une fraise à résine.

■ Adaptez le porte-empreinte sur le modèle ou directement dans la bouche du patient.

■ Contrôlez l'ajustement : si vous avez besoin d'effectuer d'autres modifications, chauffez à nouveau le porte-empreinte ou la partie que vous souhaitez corriger.

Vous avez maintenant un porte-empreinte personnalisé. Laissez le refroidir afin de retrouver la rigidité originale puis prenez les empreintes définitives avec le matériau et la technique de votre choix.



4 Moulage des bords

Appliquez le matériau d'empreinte de votre choix et mettez au point les bordures périphériques (ex. en demandant au patient de téter votre index pendant qu'il effectue des mouvements latéraux de la mâchoire).



5 Empreintes définitives et matériaux d'empreinte

Prenez les empreintes définitives avec le matériau et la technique de votre choix. Pour le matériau d'empreinte, vous pouvez également utiliser celui de votre choix.

Remarque concernant l'ajustement direct du porte-empreinte dans la bouche du patient

Vous remarquerez que les porte-empreintes chauffés reviennent rapidement à une température idéale pour le modelage, mais assurez vous de tester les porte-empreintes sur une zone sensible de votre peau (ex. votre poignet) avant de l'introduire dans la bouche du patient.